

Inoue Ballonkatheter

Perkutane transvenöse Mitralkommissurotomie (PTMC)

Der Inoue Ballonkatheter ist der originale, speziell für die perkutane transvenöse Mitralkommissurotomie (Mitralklappenvalvuloplastie, Mitralklappensprengung) entwickelte Ballonkatheter, um Patienten mit Mitralklappenstenose optimal interventionell behandeln zu können. Er zeichnet sich durch eine einzigartige Katheter- und Ballonkonstruktion aus, mit dem Ziel, maximale Sicherheit und Performance


während des medizinischen Eingriffs zu erreichen. Er wird durch eine Leistenvene in den rechten Vorhof und von dort über das Vorhofseptum weiter in den linken Vorhof vorgeschoben. Mit Hilfe eines gebogenen Mandrins wird der flexible distale Teil des Katheters mit dem Ballon in der Mitralklappe positioniert, um diese anschließend aufzudehnen.

Vorteile

- Einzigartige Katheter- und Ballonkonstruktion für maximale Sicherheit und Performance
- Ballongröße kann kontrolliert variiert werden
- Jeder Ballon deckt bis zu 3 Größenbereiche ab
- Rein interventionelles Verfahren, keine Thorakotomie nötig

Eigenschaften

- Mehrschichtballon mit Gewebeeinlage
- Sanduhr-Form für einfache und optimale Positionierung
- Katheter distal sehr flexibel für optimale Steuerbarkeit und Sicherheit
- Schlankes Profil für leichte perkutane Einführung und Vermeidung der Entstehung von Vorhofseptumdefekten
- Kathetermaterial: PVC, Ballonmaterial: Latex

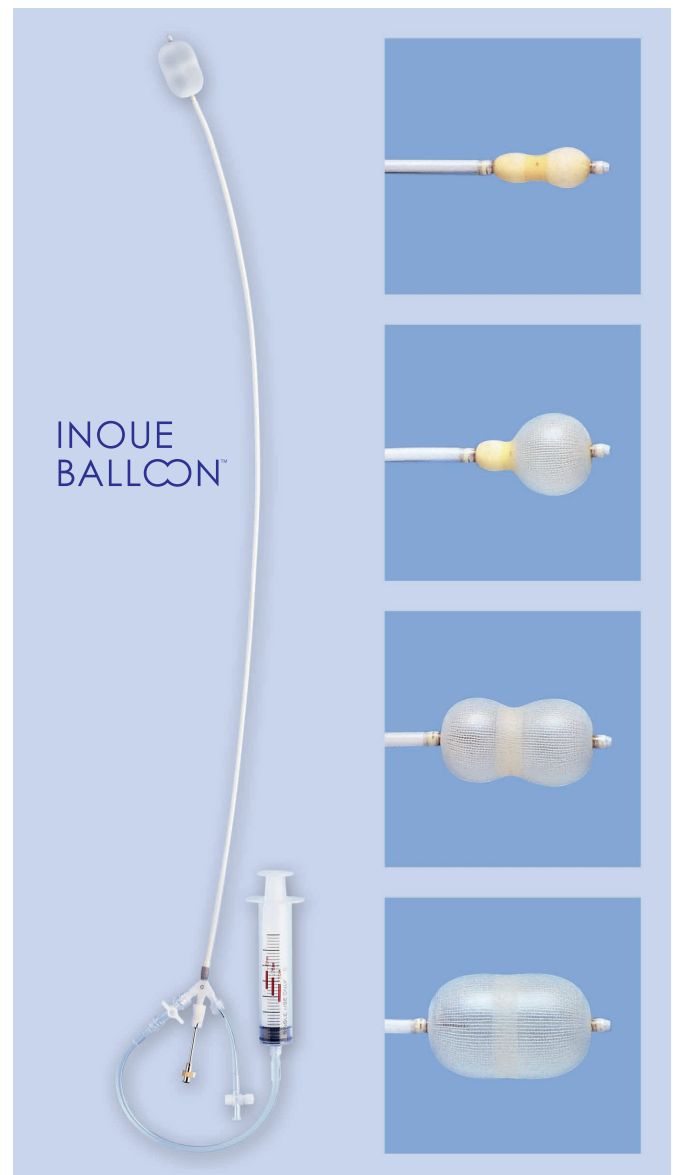


Bestellinformationen

Inoue Ballonkatheter

Artikel	Ballon- durchmesser	Außen- durchmesser	Länge	REF-Code	Bestellnr.
Inoue Ballonkatheter 30	26-30 mm	12F	70 cm	PTMC-30	30030005
Inoue Ballonkatheter 28	24-28 mm	12F	70 cm	PTMC-28	30030004
Inoue Ballonkatheter 26	22-26 mm	12F	70 cm	PTMC-26	30030003
Inoue Ballonkatheter 24	20-24 mm	12F	70 cm	PTMC-24	30030002
Inoue Ballonkatheter 22	20-22 mm	12F	70 cm	PTMC-22	30030001
Inoue Ballonkatheter 20	18-20 mm	12F	70 cm	PTMC-20	30030000
Inoue Dilatator	–	14F	70 cm	DMS-1	30030006
Inoue Führungsdraht	–	0.025" (0,64 mm)	175 cm	GMS-1	30030007
Inoue Ballonstrecker	–	1,2 mm	80 cm	KMS-1	30030008
Inoue Mandrin	–	0.038" (0,97 mm)	80 cm	SMS-1	30030009

Setinhalt Inoue Ballonkatheter

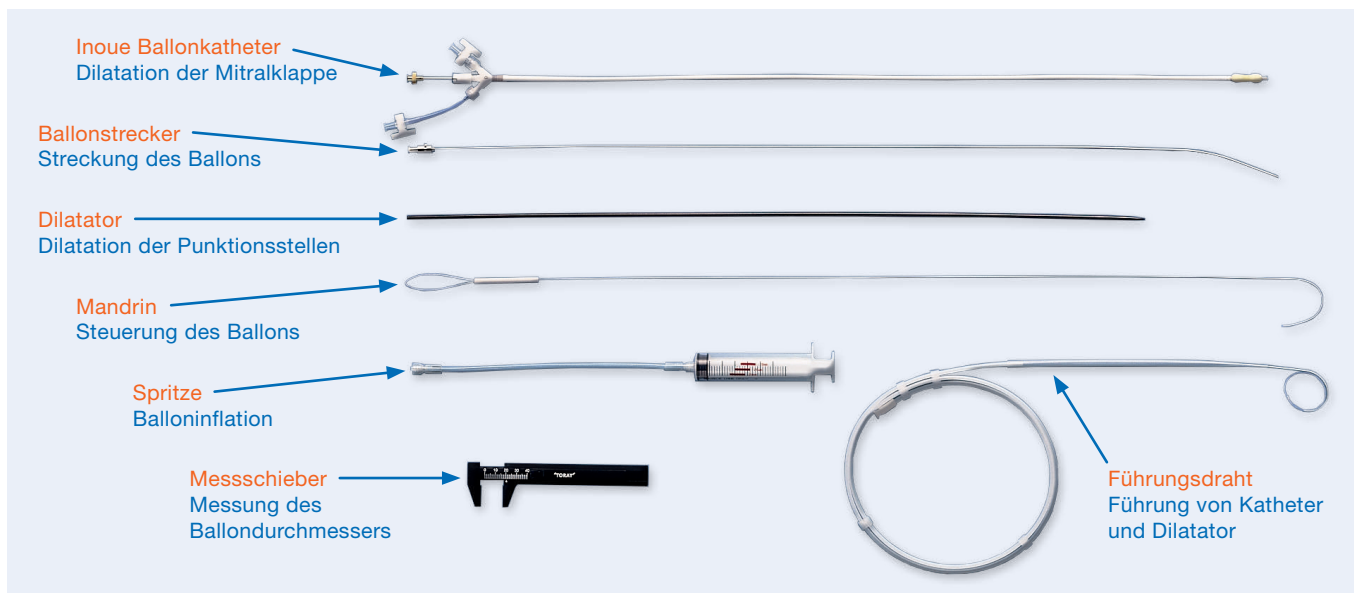

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

Telefon: 0241-997532-22 | Fax: 0241-997532-99 | E-Mail: kundenservice@bispingmed.de

Ein Produkt unseres Partners

TORAY

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte auch der Gebrauchsanweisung.