

EasyCool[®], EasyFlush[®]

Steuerbare, gekühlte RF-Ablationskatheter

EasyCool und EasyFlush sind quadropolare RF-Ablationskatheter mit Gold oder Platin/Iridium (Pt/Ir) als Elektrodenmaterial. Die Katheter sind in zwei distalen Steifigkeiten verfügbar. Das in die Tip-Elektrode integrierte Thermoelement ermöglicht eine permanente, exakte Temperaturkontrolle. Die Oberfläche und das Material des Katheterschaftes tragen zur Reduzierung der Thrombenbildung bei. Der Katheter ist ruckfrei und stufenlos steuerbar und sehr


drehstabil und ermöglicht so eine ideale Positionierbarkeit. Die Auslenkung der Katheterspitze erfolgt proportional zur Bewegung des distalen Teils des Griffstücks. Die einmal erreichte Position bleibt stabil. Die Größe der Kurvenform hängt von der Länge der steuerbaren Katheterspitze ab. Der Katheter kann durch jeden geeigneten Führungskatheter eingeführt und positioniert werden.

Eigenschaften

- Quadropolarer RF-Ablationskatheter
- Unidirektional steuerbar 0-235°
- Aktive, offene Kühlung über 12 Austrittsöffnungen in der Tip-Elektrode
- In Tip-Elektrode integrierter Temperatursensor
- Hochwertiger Griff für optimales Handling und ruckfreie, stufenlose Steuerung
- Verschiedene Kurven
- Verschiedene distale Steifigkeiten
- Luer-Kühlschlauchanschluss

Technische Daten

- Anzahl der Elektroden: 4
- Elektrodenabstand: 2/5/2 mm
- Elektrodenlänge: Ringe 2 mm, Tip 4 mm
- Elektrodenmaterial: Gold oder Platin/Iridium
- Nutzbare Katheterlänge: 100 cm
- Katheter-Außendurchmesser: 7 F (2,33 mm)

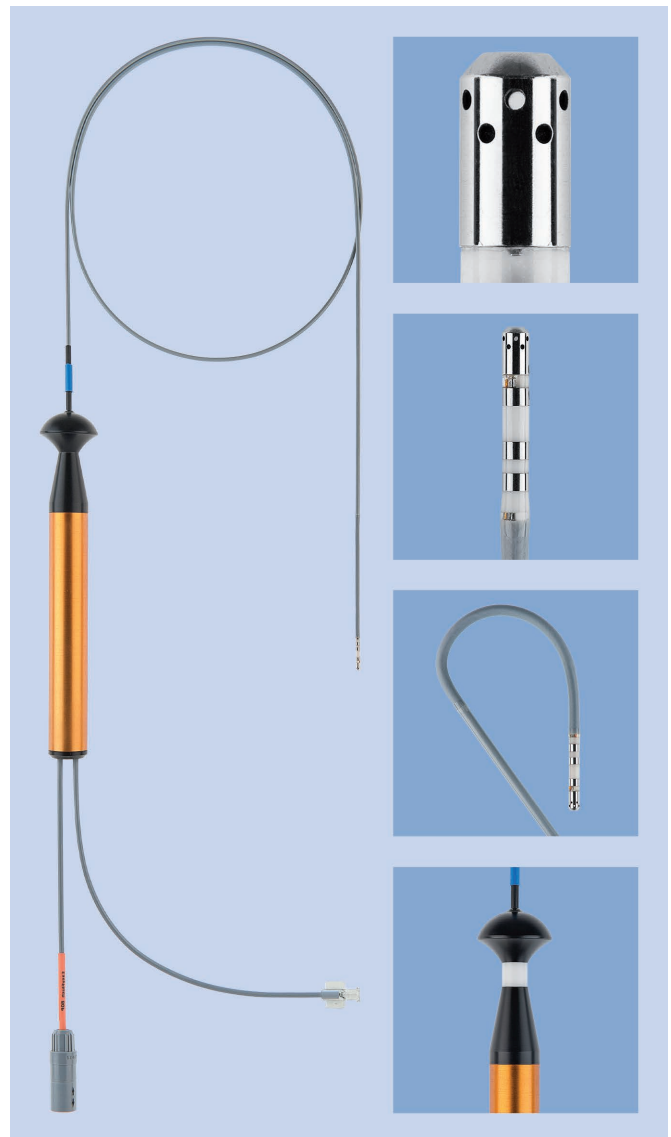

Bestellinformationen

EasyCool®, EasyFlush®

Artikel	Farb-codierung	Länge steuerbare Spitze	Kurve (ca.)	Distale Steifigkeit	Elektrodenmaterial	REF-Code	Bestellnr.
EasyCool 60 G4	Rot	60 mm	B	soft	Gold	105327	39105327
EasyCool 70 G4	Grün	70 mm	D	soft	Gold	105229	39105229
EasyCool 80 G4	Blau	80 mm	F	soft	Gold	105247	39105247
EasyCool 90 G4	Orange	90 mm	J	soft	Gold	105265	39105265
EasyCool 60 G4 S	Rot	60 mm	B	steif	Gold	105416	39105416
EasyCool 70 G4 S	Grün	70 mm	D	steif	Gold	105417	39105417
EasyCool 80 G4 S	Blau	80 mm	F	steif	Gold	105418	39105418
EasyCool 90 G4 S	Orange	90 mm	J	steif	Gold	105419	39105419
EasyFlush 70 P4	Grün	70 mm	D	soft	Pt/Ir	105226	39105226
EasyFlush 80 P4	Blau	80 mm	F	soft	Pt/Ir	105244	39105244
EasyFlush 90 P4	Orange	90 mm	J	soft	Pt/Ir	105262	39105262
EasyFlush 70 P4 S	Grün	70 mm	D	steif	Pt/Ir	105464	39105464
EasyFlush 80 P4 S	Blau	80 mm	F	steif	Pt/Ir	105471	39105471
EasyFlush 90 P4 S	Orange	90 mm	J	steif	Pt/Ir	105479	39105479

Empfohlene Mindestgröße der Einführschleuse: 8 F (2,67 mm)

Patientenkabel

Artikel	HF-Generator	Länge	Bestellnr.
MagnoConnect E	EP-Shuttle	250 cm	39100015
MagnoConnect I	IBI-1500T11	250 cm	39100013
MagnoConnect H	HAT 300	250 cm	39100014
MagnoConnect B	Bard CAG	250 cm	39100323
MagnoConnect A	ATAKR	250 cm	39100016

Schlauchset

Artikel	Pumpe	Länge	Bestellnr.
Schlauchset CF	CoolFlow	280 cm	39103555
Schlauchset SmA	SmartAblate	400 cm	39103523
Schlauchset MQ	MetriQ	280 cm	39103512

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

Telefon: 0241-997532-22 | Fax: 0241-997532-99 | E-Mail: kundenservice@bispingmed.de

CoolFlow™, SmartAblate™ sind Marken der Biosense Webster, Inc.
MetriQ™ ist eine Marke der Boston Scientific, Inc.

Weitere technische Details:

Applizierbare Leistung, unipolare Applikation 75 Watt maximal | Betriebstemperatur 30-80 °C | Messgenauigkeit ± 2 °C Spülanschluss Luer weiblich | Anschlussstecker 9-polige REDEL Kupplung, 60° codiert

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte auch der Gebrauchsanweisung.

Ein Produkt unseres Partners

